



**materace
ewakuacyjne**

Instrukcja obsługi

Materac ewakuacyjny COMFORT

Dziękujemy za wybranie naszego materaca ewakuacyjnego

Przeznaczenie i zakres użytkowania materaca ewakuacyjnego

Materac ewakuacyjny COMFORT umożliwia ewakuację osób z obiektu w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia – podczas pożaru nie można korzystać z wind, dźwigów osobowych, chyba że są to windy przeznaczone do ewakuacji; windy/dźwigi mogą być również niedostępne z uwagi na awarię, zajętość przez innych użytkowników czy okresowe przeglądy i konserwacje.

Materac ewakuacyjny został zaprojektowany do transportu/ewakuacji osób w pozycji leżącej po schodach i po powierzchni poziomej. Materac może być stosowany w wąskich klatkach schodowych tam gdzie ma możliwość użycia krzesła ewakuacyjnego. Jest przeznaczony do użytku przez odpowiednio przeszkolonych i kompetentnych operatorów wyłącznie w celu ułatwienia bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Właściciel, zarządzający obiektem lub faktycznie nim władający musi zapewnić niezbędne procedury ewakuacyjne, przeszkolony personel oraz przeglądy okresowe materacy ewakuacyjnych (co najmniej raz w roku) w celu zagwarantowania bezpiecznej ewakuacji wszystkich użytkowników obiektu w sytuacji zagrożenia życia w oczekiwaniu na przybycie służb ratowniczych.

Przed użyciem materaca należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, która zawiera ogólne informacje na temat użytkowania, obsługi. Wszelkie inne środki bezpieczeństwa podejmowane przez użytkowników i operatorów obiektu powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i wytyczne krajowe. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego sprzętu ewakuacyjnego zależy wyłącznie od operatora.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, dodatkowe kopie są dostępne na żądanie.

Materac ewakuacyjny COMFORT może być dostarczony z:

- pokrowiec ochronny - 1 szt. (opcja)

Data wydania instrukcji: 30.11.2021

Data aktualizacji instrukcji: 20.12.2021

Numer wersji: COMFORT IOC.1.2

ul. Krakowska 390
32 – 080 Zabierzów
NIP: 9452220992

www.materace-ewakuacyjne.pl



biuro@ensafe.pl
+48 539 011 230



Po otrzymaniu materaca ewakuacyjnego wyjmij go z kartonu i przymocuj uchwyt montażowy do ściany – materac należy zawiesić na uchwytych.

W przypadku dostawy materaca wraz z pokrowcem należy wyjąć pokrowiec z opakowania i za pomocą otworów do montażu przymocować go do ściany.

Przed użyciem materaca przeprowadź oględziny, aby upewnić się, że:

- materac nie został uszkodzony i jest sprawny technicznie (nie ma widocznych uszkodzeń, rozdarć)
- uchwyty do transportu, pasy bezpieczeństwa, rzepy są kompletne i w dobrym stanie
- wszystkie uchwyty do transportu działają prawidłowo, także podczas manipulacji
- pasy zabezpieczające działają dobrze

Gwarancja

Materac ewakuacyjny jest objęty roczną gwarancją na wadliwe materiały i wykonanie.

Części podlegające zużyciu (np. pasy zabezpieczające, rzepy) lub uszkodzone mechanicznie lub w wyniku aktów wandalizmu lub niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją.

Powyższe warunki są warunkami standardowymi. Dla warunków ustalanych indywidualnie obowiązują zapisy w umowie pomiędzy stronami.

Montaż naścienny

Jeśli materac został wyposażony w pokrowiec ochronny przymocuj go na uchwytych montażowych do ściany (lokalizacja zgodnie z opracowaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego lub audytem przeciwpożarowym). Zalecamy zamontowanie materaca ewakuacyjnego na takiej wysokości, aby umożliwić czyszczenie podłogi bez zdejmowania materaca ze ściany oraz aby był on widoczny a dostęp do niego nie był niczym ograniczony.



ul. Krakowska 390
32 – 080 Zabierzów
NIP: 9452220992



www.materace-ewakuacyjne.pl



biuro@ensafe.pl
+48 539 011 230

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Tylko odpowiednio przeszkoleni i kompetentni operatorzy powinni obsługiwać materac ewakuacyjny. Operatorzy powinni przechodzić regularne szkolenia w tym zakresie (zalecamy co najmniej 1 raz w roku).
- Materac powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nigdy nie można przekraczać maksymalnego udźwigu 210 kg.
- Operator nie może pozostawiać użytkownika na materacu bez nadzoru.
- Operator musi unikać gwałtownych, niekontrolowanych ruchów, ponieważ może to spowodować obrażenia osoby ewakuowanej.
- Tylko kompetentne osoby powinny przeprowadzać okresowy przegląd materaca ewakuacyjnego.


Materac ewakuacyjny powinien być obsługiwany przez dwie osoby.

Wszyscy operatorzy powinni odbyć szkolenie z obsługi materaca ewakuacyjnego – zaleca się aby zostało ono przeprowadzone przez Producenta. Operatorzy muszą być sprawni fizycznie i psychicznie, nosić odpowiednie obuwie i odzież, być gotowi do obsługi materaca w sytuacji awaryjnej, znać i rozumieć procedury oraz plan ewakuacji.




Producent:	EnSafe Sp. z o.o.
Model:	COMFORT
Materiał:	Poliester
Max. obciążenie:	210 kg
Urządzenie medyczne:	Klasa I

Przygotowanie materaca ewakuacyjnego COMFORT do użycia

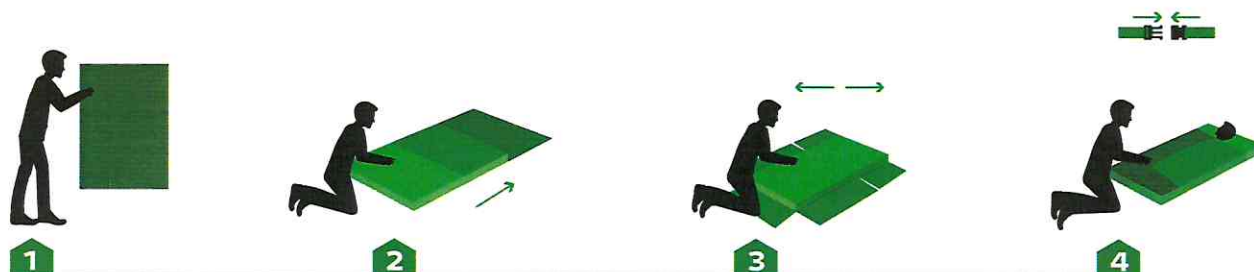

Ewakuacja w dół i poziomie

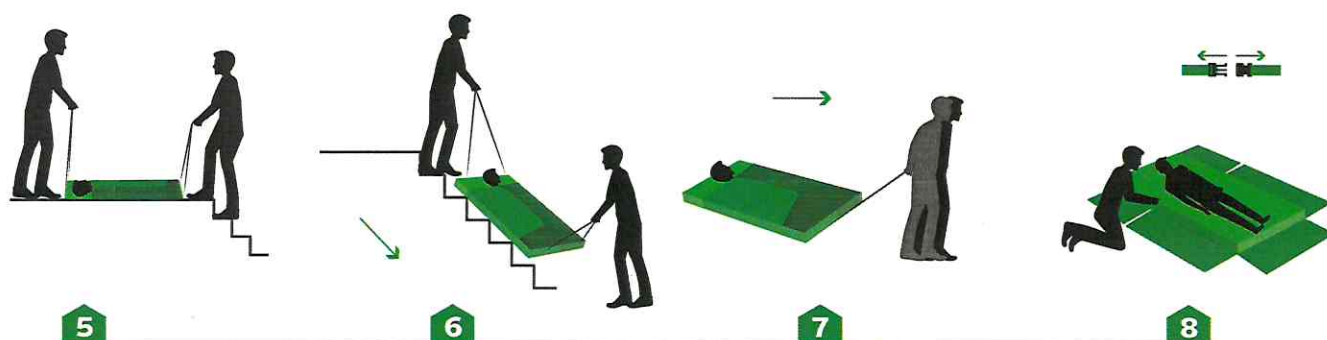

ul. Krakowska 390
32 - 080 Zabierzów
NIP: 9452220992



www.materace-ewakuacyjne.pl



biuro@ensafe.pl
+48 539 011 230

Dodatkowe informacje

Każdy poważny incydent, który zaistniał w związku z wyrobem należy zgłosić wytwórcy oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (w przypadku incydentów na terenie RP).

Zgłoszenie incydentu medycznego oraz kopię zgłoszenia incydentu medycznego należy przesłać do Prezesa Urzędu drogą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr +48 22 492 11 29), listem poleconym lub kurierem (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).

Incydent medyczny jest zgłaszany na formularzu zgłaszania incydentu medycznego.

Definicje:

1. „Poważny incydent” oznacza każdy incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub mógł doprowadzić do którejkolwiek z poniższych sytuacji:

(a) śmierć pacjenta, użytkownika lub innej osoby,

(b) czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby,

c) poważne zagrożenie zdrowia publicznego.

2. „Poważne zagrożenie zdrowia publicznego” oznacza zdarzenie, które może skutkować bezpośrednim ryzykiem śmierci, poważnym pogorszeniem stanu zdrowia osoby lub poważną chorobą, które może wymagać niezwłocznego podjęcia działań naprawczych i które może spowodować znaczną zachorowalność lub śmiertelność u ludzi, albo coś niezwykłego lub nieoczekiwanego w danym miejscu i czasie.

Producent materaca ewakuacyjnego: EnSafe Sp. z o. o, Polska

Nazwa handlowa produktu, model: Materac ewakuacyjny, Comfort

Kraj pochodzenia: Polska

Informacje o produkcie:

- Wyrób medyczny klasy I, zgodnie z zasadą 1, załącznik VIII Rozporządzenia o Wyrobach Medycznych (UE) 2017/745





**materace
ewakuacyjne**

Kontakt:

EnSafe Sp. z o. o.
ul. Krakowska 390
32-080 Zabierzów
biuro@ensafe.pl



**materace-
ewakuacyjne**



Zeskanuj mnie!



ul. Krakowska 390
32 – 080 Zabierzów
NIP: 9452220992



www.materace-ewakuacyjne.pl



biuro@ensafe.pl
+48 539 011 230